

S Y N C A

KULLANIM KILAVUZU

S Y N C A

CirC

Kompakt Masaj Koltuđu

MR320



Kullanmadan önce lütfen bu KULLANIM KILAVUZUNU dikkatlice okuyun.

www.synca-wellness.com

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, lütfen bu KULLANIM KILAVUZUNU dikkatlice okuyun ve düzgün çalışmasını ve kullanılmasını sağlamak için güvenlik önlemlerine özellikle dikkat edin. Lütfen bu KULLANIM KILAVUZUNU daha sonra kullanmak üzere saklayın.

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK TALİMATLARI	1
HER BİR BİLEŞENİN ADI VE İŞLEVI	4
Dış yapı	4
İçyapı	4
Kumanda	5
Kumandanın kullanımı	6
Kurulum	9
Kurulum yeri	9
Zemin koruması	9
Cihazın bulunduğu ortam	9
Kurulumu Nasıl Yapılır	9
Nasıl Taşınır	10
Güç kaynağını açma	10
ÜRÜN DEPOLAMA VE BAKIM	11
SORUN GİDERME	12
TEKNİK ÖZELLİKLER	13

GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Kullanmadan önce (bu cihazla ilgili) tüm talimatları okuyun.

TEHLİKE-Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

- 1) Bu cihazı kullandıktan hemen sonra ve temizlemeden önce daima fişini prizden çekin. UYARI-Yanık, yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanması riskini azaltmak için:
 - 1) Cihaz fişe takılıken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Kullanılmadığında ve parçaları takmadan veya çıkarmadan önce fişini prizden çekin.
 - 2) Battaniye veya yastık altında çalıştırmayın. Aşırı ısınma meydana gelebilir ve yangına, elektrik çarpmasına veya kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
 - 3) Bu cihaz çocuklar, sakatlar veya engelli kişiler tarafından, onlar üzerinde iken veya yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
 - 4) Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı için kullanın. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen ek parçaları kullanmayın.
 - 5) Hasarlı bir kablosu veya fişi varsa, düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse ya da suya düşürülmüşse bu cihazı asla çalıştırmayın. Cihazı incelenmesi ve onarılması için bir servis merkezine götürün.
 - 6) Bu cihazı besleme kablosundan tutarak taşımayın veya kabloyu tutacak olarak kullanmayın.
 - 7) Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
 - 8) Cihazı asla hava delikleri tıkalıyken çalıştırmayın. Hava deliklerini tüy, saç ve benzeri cisimlerden uzak tutun.
 - 9) Asla herhangi bir aralığa bir nesne düşürmeyin veya sokmayın.
 - 10) Açık havada kullanmayın.
 - 11) Aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijen verilen yerlerde çalıştırmayın.
 - 12) Bağlantıyı kesmek için, kumandayı kapalı konuma getirin, ardından fişi prizden çekin.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

GÜVENLİK TALİMATLARI

Güvenlik Talimatları

► Kullanmadan önce, düzgün çalışmasını sağlamak için lütfen bu "GÜVENLİK TALİMATLARI"nı dikkatlice okuyun.

► Aşağıdaki "GÜVENLİK TALİMATLARI" bu masaj koltuğunun doğru kullanımını sağlamak için size çok yardımcı olacaktır.



UYARI – Yanlış kullanım ürün hasarına neden olabilir.



DİKKAT - Yanlış kullanım, kullanıcıların yaralanmasına neden olabilir.






Yasak. Özel talimatlar şema çizimlerinde belirtilecektir. (Örneğin, soldaki çizimler sökmeye izin verilmediği anlamına gelir).






Zorunlu talimatlar şema çizimlerinde belirtilecektir. (Örneğin, soldaki çizim elektrik fişinin çıkarılması gerektiği anlamına gelir)



UYARI


 ZORUNLU	Aşağıda belirtilen durumlarda olan kişilerin kullanmadan önce bir doktora danışmasını öneririz. 1. Kalp pili vb. gibi vücuda yerleştirilmiş elektronik tıbbi alet kullananlar. 2. Şu anda bir doktor tarafından tedavi edilenler, özellikle de kendilerini rahatsız veya iyi hissetmeyenler. 3. Kötü huylu tümörler, kalp hastalığı veya diğer ciddi tıbbi durumlardan muzdarip olanlar.
 YASAK	<ul style="list-style-type: none">• Zihinsel engellilerin koltuğu gözetimsiz kullanmasına izin vermeyin.• Çocukların masaj koltuğu üzerinde oynamasına veya kullanmasına izin vermeyin.• Masaj koltuğunu aynı anda birden fazla kişinin kullanmasına izin vermeyin.• Güç kablosu veya elektrik fişi herhangi bir şekilde hasar görürse, derhal güç kaynağıyla bağlantısını kesmeli ve onarım veya değiştirme için yetkili bir servis sağlayıcısına danışmalısınız.
 SÖKMEK YOK	Şirketimiz tarafından belirlenen bakım personeli dışında hiç kimse bu masaj koltuğunu sökmemeli, bakımını yapmamalı veya yeniden yapılandırmamalıdır. Herhangi bir sorun olması halinde, lütfen derhal yerel satıcınızla irtibata geçin.

GÜVENLİK TALİMATLARI


 <p>ZORUNLU</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Lütfen masaj koltuğunu sürekli olarak 20 dakikadan fazla kullanmayın veya vücudun belirli bir bölümünü sürekli olarak 5 dakikadan fazla odak olarak kullanmayın.◆ Lütfen masaj koltuğunu kullanmak için düz bir zemine koyun.◆ Elektrik fişini çıkarırken, lütfen fişin başını tutun, elektrik kablosunu çekmeyin.◆ Lütfen belirtilen elektrik voltajından farklı bir güç kaynağına takmayın, çünkü bu yangına neden olabilir veya masaj koltuğuna zarar verebilir.◆ Kullanmadan önce, sırtlığın veya kumaşın hasar görüp görmediğinden emin olmak için lütfen sırt yastığının altını kontrol edin; hasar görmüşse, lütfen bu masaj koltuğunu kullanmayı derhal bırakın ve derhal onarım için yerel satıcınızla iletişime geçin.◆ Lütfen kumandayı nemli ellerle çalıştırmayın ve kumandanın üzerine ağır nesnelere koymayın.◆ Yalnızca 2001b (90kgs) altındaki kişiler kullanabilir.◆ Lütfen bu masaj koltuğu ile birlikte başka tedavi ekipmanları kullanmayın.
 <p>YASAK</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Rahatsızlığa neden olmamak için, masaj koltuğunu yemeklerden hemen sonra kullanmayın.◆ Masaj koltuğu çalışırken masaj koltuğunda uyuyakalmayın.◆ Sarhoş olduğunuzda veya kendinizi iyi hissetmediğinizde masaj koltuğunu kullanmayın.◆ Döşeme kirlenirse, lütfen birinci sınıf deri temizleyici kullanın, kimyasal temizleyiciler, benzin veya deterjan vb. kullanmayın.
 <p>FIŞİ ÇEKİN</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Bakımdan önce lütfen fişi çekin. Ayrıca, elektrik çarpmasını önlemek için lütfen elektrik fişini nemli ellerle takmayın veya çıkarmayın.◆ Masaj koltuğu kullanılmadığında, lütfen gücü kapatın ve fişi prizden çıkarın.

HER BİLEŞENİN ADI VE İŞLEVİ

Dış yapı

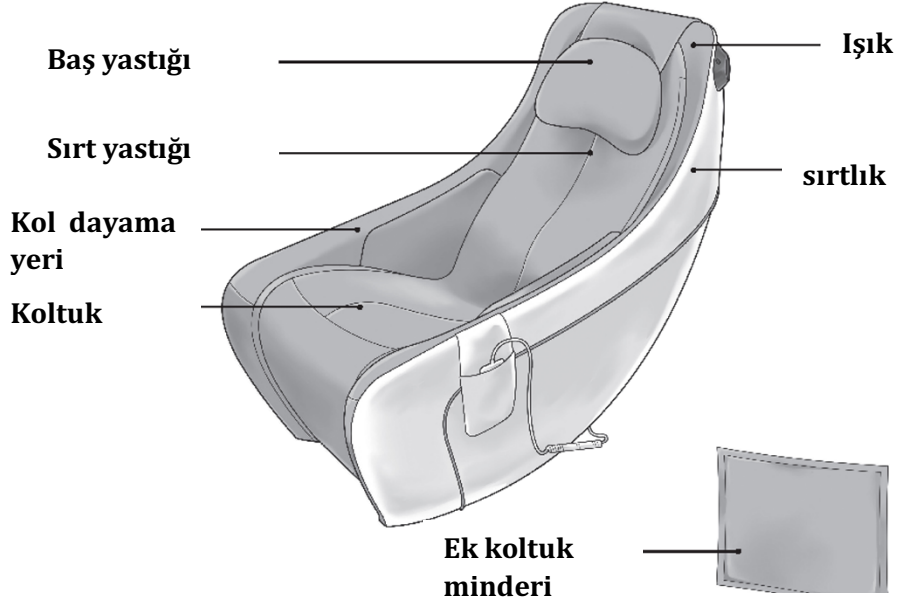


İçyapı

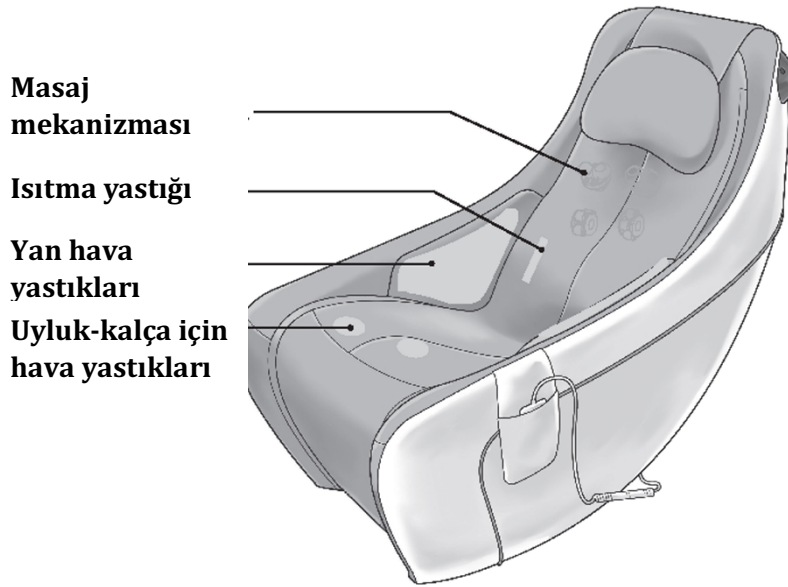

HER BİLEŞENİN ADI VE İŞLEVİ

Kumanda

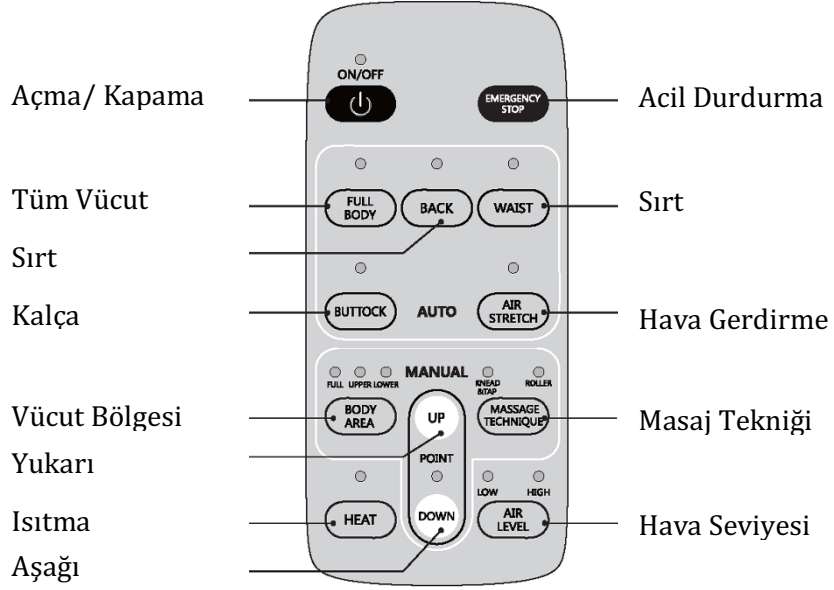

HER BİLEŞENİN ADI VE İŞLEVİ

Kumandanın Kullanımı



AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ

- Güç açıkken, koltuğu çalıştırmak için "AÇMA/KAPAMA" düğmesine basın, açık olduğunu bildirmek için ışık yanık kalacaktır, masajı başlatmak için OTOMATİK veya MANUEL programdan herhangi birini seçin. Masajı kapatmak için düğmeye tekrar basın (nominal süre 15 dakikadır) (AÇMA / KAPAMA düğmesine bastıktan sonra 30 saniye içinde herhangi bir program seçmediyseniz, otomatik olarak kapanacaktır).



Acil Durdurma Düğmesi

- Herhangi bir zamanda, tüm fonksiyonları durdurmak için "ACİL DURDURMA" düğmesine basın, masajı yeniden başlatmak için "AÇMA/KAPAMA" düğmesine basın.



Tüm Vücut Düğmesi

- Güç açıkken, tüm vücudunuz için otomatik modu başlatmak için "TÜM VÜCUT" düğmesine basın.



Sırt Düğmesi

- Güç açıkken, sırt kısmınıza odaklı otomatik modu başlatmak için "SIRT" düğmesine basın.



Bel Düğmesi

- Güç açıkken, bel kısmınıza odaklı otomatik modu başlatmak için "BEL" düğmesine basın.



Kalça Düğmesi

- Güç açıkken, uyluk ve kalça kısmınıza odaklı otomatik modu başlatmak için "KALÇA" düğmesine basın.



Hava Gerdirme Düğmesi

- Güç açıkken, otomatik modda hava basıncı modunu başlatmak için "HAVA GERDİRME" düğmesine basın.



Vücut Bölgesi Düğmesi


- OTOMATİK masaj modu sırasında, manuel masaj moduna geçmek için "VÜCUT BÖLGESİ" düğmesine basın ve masaj konumlarını TAM, ÜST, ALT arasında değiştirin.
- MANUEL masaj modu sırasında, masaj konumunu TAM, ÜST, ALT arasında değiştirmek için "VÜCUT BÖLGESİ" düğmesine basın.

HER BİLEŞENİN ADI VE İŞLEVİ



MASAJ TEKNİĞİ DÜĞMESİ

- OTOMATİK masaj modu sırasında, MANUEL masaj moduna geçmek için MASAJ TEKNİĞİ düğmesine basın ve masaj tekniklerini YOĞURMA & HAFİFÇE VURMA ve OVALAMA arasında değiştirin.

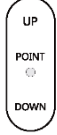

Yukarı Düğmesi

- Herhangi bir masaj modu sırasında, NOKTA masaj moduna geçmek için YUKARI düğmesine basın, mekanizmayı yukarı hareket ettirmek için düğmeyi basılı tutun. NOKTA modunda sadece YOĞURMA & HAFİFÇE VURMA masajı yapar.

Aşağı Düğmesi

- Herhangi bir masaj modu sırasında, NOKTA masaj moduna geçmek için AŞAĞI düğmesine basın, mekanizmayı aşağı hareket ettirmek için düğmeyi basılı tutun. NOKTA modunda sadece YOĞURMA & HAFİFÇE VURMA masajı yapar.



Isıtma Düğmesi

- Herhangi bir masaj modu sırasında, ısıtma fonksiyonunu açmak/kapatmak için "ISITMA" düğmesine basın.



Hava Seviyesi Düğmesi

- "HAVA GERDİRME" hariç tüm masaj modları sırasında, "DÜŞÜK" ve "YÜKSEK" seviye arasında geçiş yapmak, hava basıncı fonksiyonunu kapatmak veya hava basıncı fonksiyonunu açmak için "HAVA SEVİYESİ" düğmesine basın.
- "HAVA GERDİRME" masaj modu sırasında "DÜŞÜK" veya "YÜKSEK" seviyesini ayarlamak için "HAVA SEVİYESİ" düğmesine basın.


KURULUM

Kurulum Yeri

Masaj koltuğunun önünde ve arkasında güvenli bir mesafe olduğundan emin olun. Arka: duvardan veya diğer engellerden en az 4 inç (10 cm);


Ön: koltuğun veya herhangi bir engelin önünde en az 8 inç (20 cm);

Sinyal parazitini önlemek için, lütfen TV, radyo veya diğer video veya ses cihazlarından en az 40 inç (1 m) uzakta tutun.

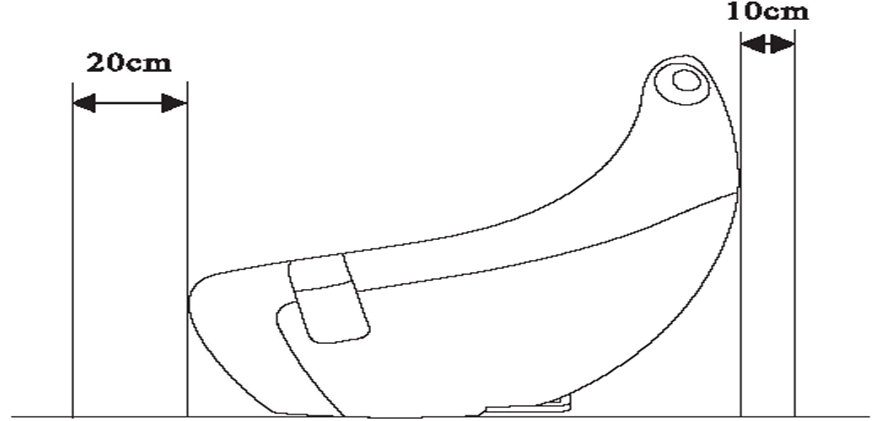

Zemin Koruması

Düz bir yüzey sağlamak için lütfen masaj koltuğunun altına halı veya başka bir ped koyun.

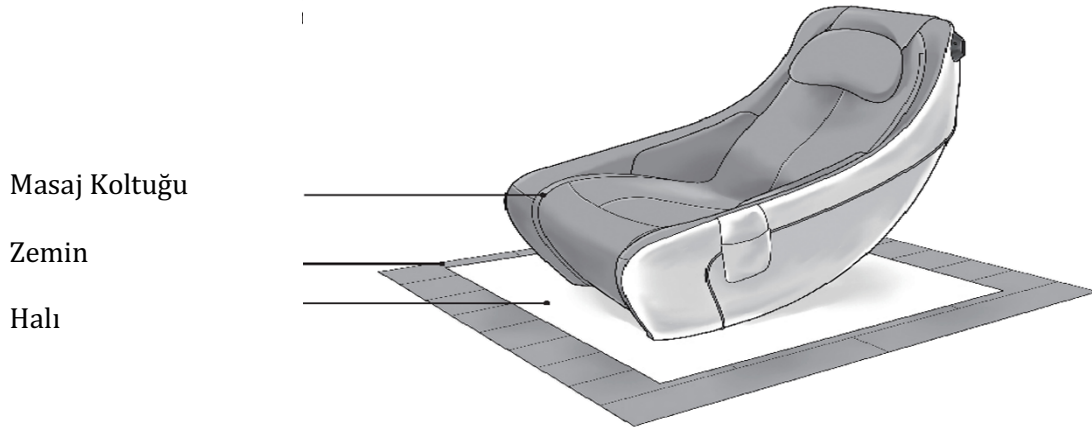

Cihazın Bulunduğu Ortam

Düz bir yüzey sağlamak için lütfen masaj koltuğunun altına halı veya başka bir ped koyun.



Elektrik risklerini önlemek için masaj koltuğunu nemli yerlerden (örneğin: banyo) uzak tutun.



Yangını veya sentetik deri malzemenin zarar görmesini önlemek için masaj koltuğunu yüksek sıcaklıklardan (örneğin: soba) uzak tutun.


KURULUM

Kurulum Yöntemi

(Koltuğu kendi başınıza hareket ettirmemenizi ve birinden yardım istemenizi öneririz).


Adım 1

- Karton ambalajı açın, masaj koltuğunu ve tüm aksesuarları dikkatlice çıkarın.
- Destek ayağını geriye doğru çevirin (destek ayağı masaj koltuğunun alt kısmında bulunur)

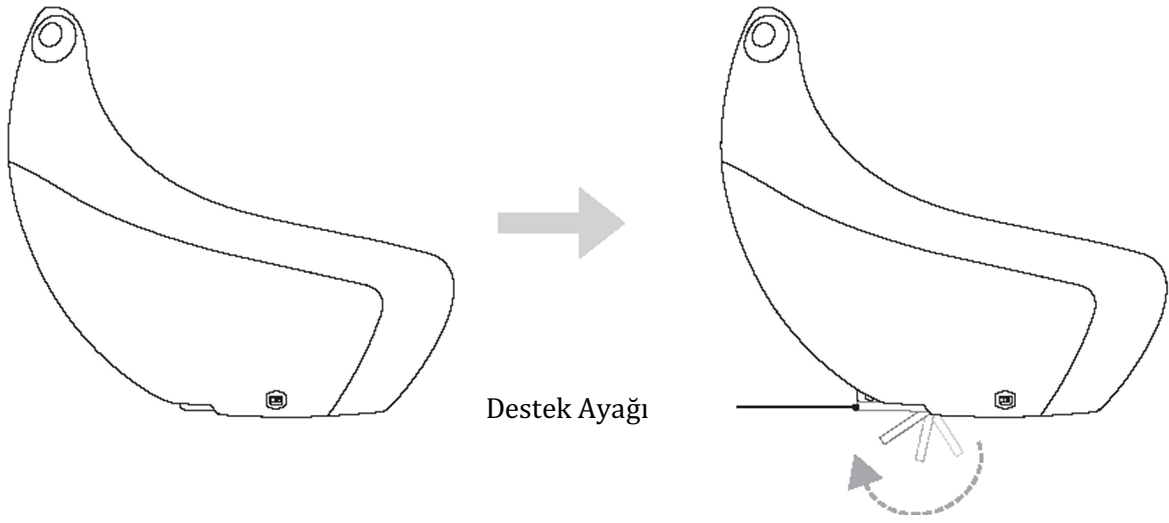

Adım 2: Aksesuarlar

- Güç kablosunu koltuğa takın ve güç düğmesini açın ve masaj koltuğunu uzaktan kumanda ile çalıştırın.

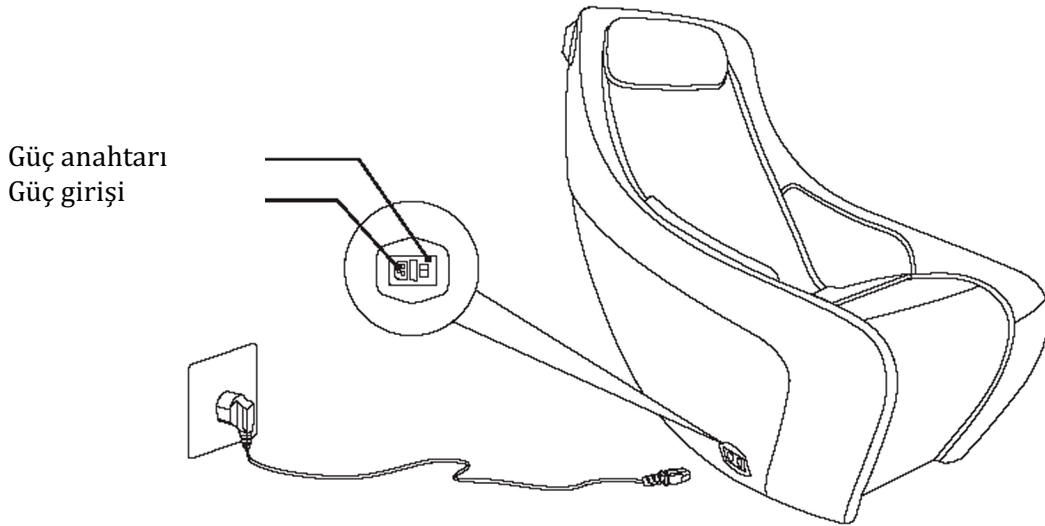

Dikkat

- Kullanmadan önce lütfen hiçbir kablonun birbirine dolaşmadığından emin olun.

KURULUM

Koltuğun Taşınması

► Koltuğu kapatın ve fişini çekin.



- Üzerinde biri varken koltuğu hareket ettirmeyin.
- Koltuğu hareket ettirirken kol dayama yerini kullanmayın, sadece tabanı ve sırtlığı tutun.

Güç kaynağını açın

- Güç kablosunu prize takın.
- Kol dayama yerinin sağ alt kısmında (koltukta oturuyorsanız) bulunan güç düğmesini açın.



- Koltuğu çalıştırmadan önce, lütfen güç kablosunun hasar görmediğinden emin olun.
- Koltuk fişe takılmadan önce güç düğmesinin kapalı olduğundan emin olun.


Topraklama talimatı

Bu ürün topraklanmalıdır. Arızalanması veya bozulması durumunda topraklama, elektrik çarpması riskini azaltmak için elektrik akımına en az direnç gösteren bir yol sağlar. Bu ürün, ekipman topraklama iletkenine ve topraklama fişine sahip bir kablo ile donatılmıştır. Fiş, tüm yerel kanun ve yönetmeliklere uygun olarak düzgün şekilde kurulmuş ve topraklanmış uygun bir prize takılmalıdır.

TEHLİKE

Ekipman topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpması riskine neden olabilir. Ürünün doğru şekilde topraklanıp topraklanmadığı konusunda şüpheleriniz varsa uzman bir elektrikçiye veya servise danışın. Ürünle birlikte verilen fiş prize uymuyorsa değiştirmeyin, uygun bir priz taktırın.

Bu ürün nominal 120 voltluk bir devrede kullanım içindir ve aşağıdaki şekil A çiziminde gösterilen fişe benzeyen bir topraklama fişine sahiptir. Ürünün fişle aynı konfigürasyona sahip bir prize bağlandığından emin olun. Bu ürünle birlikte hiçbir adaptör kullanılmamalıdır.

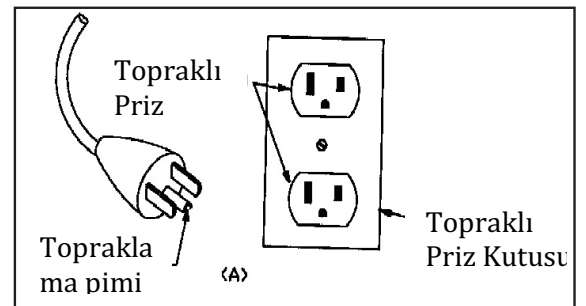

Topraklama

- Bu masaj koltuğu Birinci Seviye elektrikli cihaza aittir, üç çekirdekli elektrik prizi kullandığınızdan emin olun ve kullanım sırasında elektrik kaçağı, elektrik çarpması ve diğer bazı olumsuz etkilerden kaçınmak için elektrik prizine bağlı topraklama kablosunun iyi bir şekilde topraklandığından emin olun.

ÜRÜN DEPOLAMA VE BAKIMI

1. Temizlik

- Temizlemeden önce, fişin prizden çekildiğinden emin olun. Masaj koltuğunun ana ünitesini silmek için temizleyici ile nemlendirilmiş bir bez parçası kullanın ve ardından silmek için kuru ve yumuşak bir bez parçası kullanın.



Dikkat

- Masaj koltuğunu temizlemek için benzin veya tiner gibi aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın, aksi takdirde döşemenin rengi solacak veya masaj koltuğu kumaşı çatlayacak ve aşınacaktır. Döşemeyi ütölemeyin.

2. Bakım

- Koltuğun fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.
- Tozları süpürün veya vakumlayın. Masaj koltuğunu temiz tutun ve nemli yerlerden uzak tutun.



Dikkat

- Ürünü doğrudan güneş ışığı altında veya yüksek sıcaklıktaki yerlerde saklamayın.
- Bu, döşemenin renginin solmasına neden olabilir.

3. Suni Deri ve Astar

- Makineyi temizlemek için lütfen yumuşak ve kuru bir bez kullanın.
- Her iki veya üç ayda bir, astarı bir temizlik maddesi ile nemlendirilmiş temiz bir bezle parlatın ve kurduktan sonra kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.

SORUN GİDERME

No.	Problem	Olası Sebep	Çözüm
1	Bir çekme veya hafif bir patlama sesi duyulduğunda	Bu, çalışan motor tarafından çıkarılan normal bir sestir veya bu ses, masaj topu bez kapağa sürtüldüğünde çıkar	Bu normaldir ve onarıma gerek yoktur
		Koltuğun fişi takılı değildir	Koltuğu prize takın
2	Koltuk açılmıyor	Güç kaynağı anahtarı kapalıdır	Anahtarı açın
		Masaj koltuğunun sigortası atmıştır	Sigortayı yenisiyle değiştirin

Yukarıdaki önlemler alındıktan sonra anormal durumlar devam ederse, lütfen onarım ve bakım için yerel satıcınızla iletişime geçin. Not: Ürünü kendi başınıza sökmeyin. Şirketimiz, uygunsuz kullanım/onarım/bakım nedeniyle ürünün zarar görmesi veya herhangi bir kişinin yaralanması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir! İşbirliğiniz için teşekkürler.





Sigortayı değiştirin

- Koltuğun kapalı ve fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.
- Resim 1'de gösterildiği gibi sigortayı çıkarmak için düz uçlu bir tornavida kullanın.
- Eski sigortayı çıkarın ve Resim 2'de gösterildiği gibi aynı güçte yeni bir sigorta ile değiştirin.

Güç anahtarı

Sigorta kutusu

Elektrik prizi

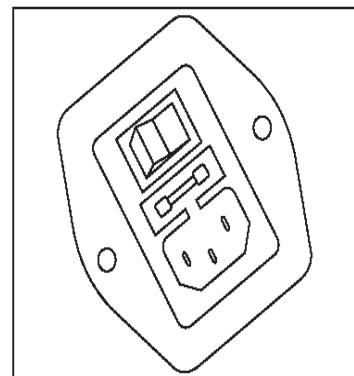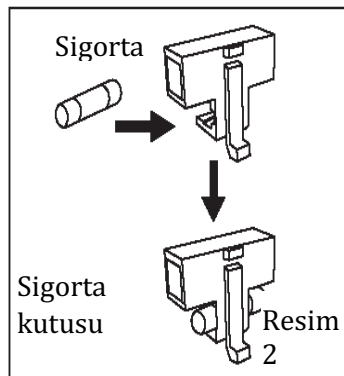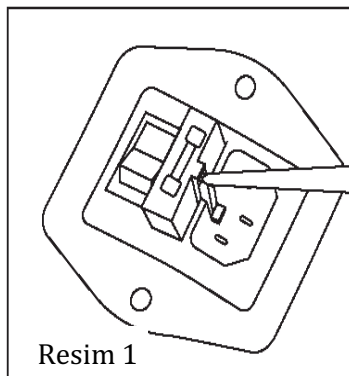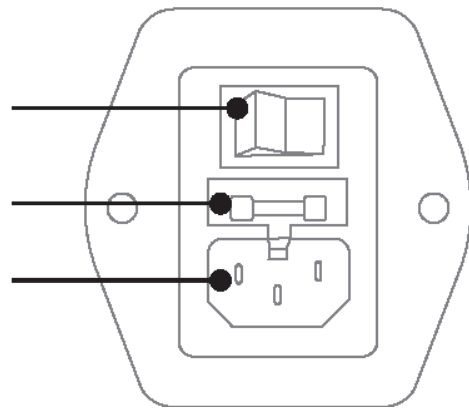

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürünün Adı : CirC-Compact Masaj Koltuğu

Model : MR320

Nominal gerilim : 110-120V-

Nominal frekans : 60 Hz

Nominal Akım : 0,45A

* Sadece belirtilen voltajda kullanın.